

Leaffresh
リーフフレッシュ


やや小さめサイズ

5枚入り

すきま
フィッター
+1個付

カットしてケースとしてご使用いただけます▼


5段プリーツマスク くもりしらず

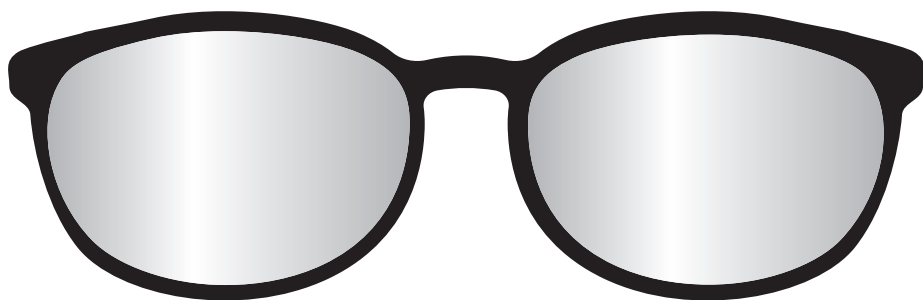

メガネ、いつでもクリア

通勤・通学・旅行などの移動中に
メガネが急にくもる悩みを解消するマスク

鼻元に沿ったウイング設計のクッションがすきまにフィット!

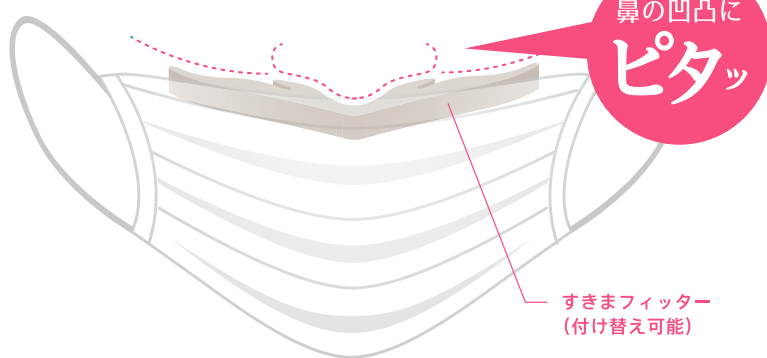

花粉・細菌

99%カット
のフィルター

花粉粒子の捕集(ろ過)効率試験
バクテリアバリア性(BFE)試験



移動中や、旅のおともに。

※本製品はマスク着用時のメガネのくもりを完全に防止するものではありません。

特長

鼻と頬にフィットする
ノーズフィッター

口元空間で息苦しくない
上2段プリーツ構造

メガネをくもりにくくする
すきまフィッター

耳が痛くならない
平ゴム採用

アゴまで密着
下3段プリーツ構造

用途

- 風邪、花粉、ほこりが気になる時などにご使用ください。
風邪等の感染拡大防止のために、咳などの症状があるときにはマスクの着用をおすすめします。

使用方法



使用上の注意

- 有毒ガス、有害粉塵に対する効果はありません。
- 本品は使い切りマスクの為、洗濯後の再利用は出来ません。
- ノーズフィッター(マスク内にセット済み)は、注意してご使用ください。
- 使用中にかゆみや痛み等の症状が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- マスク以外の用途には使用しないでください。
- 付属のすきまフィッターを使用される場合は、すきまフィッターの面ファスナー部分をマスク裏部に軽く押し付けて固定してからご使用ください。

保管上の注意

- 開封後のマスクは外袋等に入れて封をし、湿気のない清潔な場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

検査

- 検査結果データはマスクフィルターの一部の性能をあらわした試験数値です。
着用時の安全の目安とは異なります。
- このマスク(フィルター部分)は、細菌、花粉を吸着する素材で作られていますが、
感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。適宜手洗いやうがいによる予防措置をお心掛けください。

(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	マスク (商品名:5段プリーツマスクくもりしらず やや小さめ)
対象	風邪・花粉・ほこり等
素材	マスク:本体・フィルター部...ポリプロピレン 耳ひも部...ポリエステル、ポリウレタン すきまフィッター:本体...EVA樹脂 面ファスナー...ポリアミド
枚数	マスク5枚入 / すきまフィッター1本入
サイズ	マスク:約90×150(mm) すきまフィッター:約147×10×16(mm)
販売者名	株式会社トレードワークス 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル7F お問い合わせ先:0120-937-289 受付時間(祝日を除く)月曜日~金曜日 10:00~17:00
包装材の材質	袋:ポリプロピレン



GW-1611-044



製品には万全を期しておりますが、万一製品に
何かお気付きの点がございましたら、お手数ながら
販売者まで、ご連絡お願い申し上げます。

http://www.leafresh.jp MADE IN CHINA